

# かりんのぷち『トク!?!』

## ポータブルトイレのご案内

### アロン化成 FX-30“らくゾウくん”

	FX-30 品番:402922	FX-30(自動ラップ) 品番:402923
標準	38,500円(税込)	143,000円(税込)
ソフト	45,100円(税込)	149,600円(税込)
暖房	56,100円(税込)	160,600円(税込)
標準快適脱臭	64,350円(税込)	168,850円(税込)
ソフト快適脱臭	72,050円(税込)	176,550円(税込)
暖房快適脱臭	80,850円(税込)	185,350円(税込)

- 背もたれの左右にもガードがあることで  
ひじ掛けを低く設定していても座位をサポート
- ひじ掛けの高さは0~30cmにできるので  
小柄な方にも立ち上がり動作をアシスト
- ペーパーホルダーは片手で切れ、  
また位置や角度の調節が可能



ミストブルー



アースブラウン

### ポータブルトイレの掃除・ニオイ対策

ポータブルトイレを使っていると気になるのが部屋のニオイや掃除の仕方ではないでしょうか？  
少し掃除をしないでおくとニオイが取れなくなりさらに放っておくとそのニオイはどんどんきつくなります。  
雑菌が繁殖して衛生面にも悪影響が出るし、利用者にとっても介助者にとっても良くありません。  
毎日きちんと掃除をし、気持ちよくポータブルトイレを使いましょう。

### 毎日の使い方

- ・排泄物はこまめに水洗トイレに流して処理する
- ・使用時以外は便座とバケツのふたをしておく
- ・定期的に部屋の窓を開けて風の通りを良くする

### 掃除の仕方

- ・バケツ内の消毒は水をはってハイターでつけておく
- ・バケツ内の便が取れない場合は中性洗剤を使用する
- ・バケツの外側はアルコールなどで拭き掃除する
- ・常時設置するなら替えのバケツも購入しておく
- ・本体(標準タイプ)の掃除は中性洗剤で拭き掃除する
- ・磨き粉やタワシは傷がつきやすいので使用しない

医療法人敬任会 グループ  
安心安全の福祉用具・住宅改修

福祉用具かりん

〒583-0007

大阪府藤井寺市林2-6-30 シャトー林101号

電話：072-959-2068